


Coalgan[®] COMPRESSE



STOP SAIGNEMENT

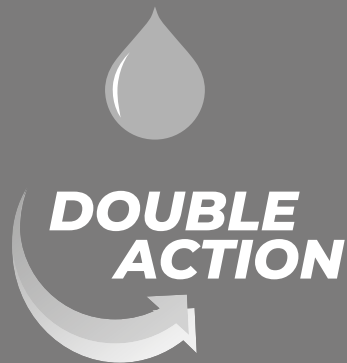

CICATRISATION

**5 COMPRESSES
STÉRILES**

3 x 5 cm

BROTHIER
LABORATOIRES

COMPOSITION / PROPRIÉTÉS

Coalgan[®] COMPRESSE, stérile, est composée d'une compresse bio-active de fibres d'alginate de calcium*.

La compresse libère son calcium pour accélérer l'agrégation des plaquettes et favoriser la cicatrisation.

Les fibres d'alginate de calcium se gélifient au contact du sang permettant ainsi un retrait indolore.

INDICATIONS

- Saignement des plaies superficielles
- Brûlures superficielles et suintantes
- Saignement de nez
- Saignements buccaux
- Saignement des zones très vascularisées (arcades sourcilières...)

Coalgan[®] COMPRESSE s'utilise chez l'enfant, l'adulte et la femme enceinte et est recommandé chez les patients présentant des troubles de l'hémostase congénitaux (Rendu-Osler, von Willebrand, Hémophilie) ou acquis (sous antiagrégants plaquettaires, anti-vitamine K ou héparines).

Un saignement persistant nécessite un avis médical.

CONTRE-INDICATIONS ET EFFETS INDÉSIRABLES

Aucune contre-indication connue à ce jour.

Coalgan[®] COMPRESSE contient des traces de tensio-actif, son utilisation peut provoquer des réactions d'hypersensibilité chez certains sujets sensibilisés.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dispositif à usage unique. Ne pas réutiliser en raison d'un risque de contamination microbienne et de perte de performance. Toujours utiliser le produit dans son intégralité (sans couper, ni effiloche). Ne doit pas rester en place plus de 24 heures.

Vérifier l'intégrité du sachet avant l'utilisation du produit.

**Issu d'algues marines*

MODE D'UTILISATION

SAIGNEMENT DE PLAIES SUPERFICIELLES

Nettoyer la plaie avec de l'eau et du savon ou du sérum physiologique (NaCl à 0,9%). Maintenir Coalgan® COMPRESSE sur la lésion en exerçant une légère pression pendant 2-3 minutes (si nécessaire avec l'aide d'un adhésif) jusqu'à l'arrêt du saignement.



Au retrait, ne pas essayer de retirer les éventuelles fibres qui subsistent dans la plaie ou dans la croûte, elles disparaîtront d'elles-mêmes avec cette dernière.

SAIGNEMENT DE NEZ

Pencher la tête en avant et se moucher afin d'éliminer d'éventuelles caillots. Rouler Coalgan® COMPRESSE dans le sens de la largeur pour obtenir une mèche compacte (la compresse doit être humidifiée uniquement avec du sérum physiologique (NaCl à 0,9%) pour faciliter son introduction). Introduire la compresse dans la narine et pincer le nez pendant 10 min. Laisser la compresse en place au moins 30 minutes et au maximum 24 heures.



Si le saignement persiste encore 8 à 15 minutes après l'application de Coalgan® COMPRESSE, consulter un médecin. Pour les saignements abondants, préférer Coalgan® MÈCHE.

INTERACTIONS

Coalgan® COMPRESSE ne doit pas être utilisée avec des solutions alcalines, telles que les solutions d'hypochlorite de sodium, ou contenant de la chlorhexidine, du chlorure de benzalkonium ou des sels de cuivre. Si de tels produits sont utilisés sur la plaie, rincer abondamment avec du sérum physiologique (NaCl à 0,9%) avant d'appliquer Coalgan® COMPRESSE.

STÉRILISATION

Produit stérile, stérilisé par rayonnement β .
Ne pas re-stériliser.

CONSERVATION

Conserver dans un endroit sec à une température inférieure à 30°C et à l'abri de la lumière. Respecter la date limite d'utilisation.

EXISTE AUSSI EN POUDRE ET EN PANSEMENT

Coalgan® POUDRE

pour les :

- Coupures, écorchures
- Plaies du cuir chevelu
- Zones de plis
- Erythèmes fessiers suintants
- Boutons de varicelle suintants
- Nombril après chute du cordon

Coalgan® ADHÉSIF

pour les :

- Coupures
- Ampoules ouvertes
- Petites plaies

CE
0459
Depuis 2014.

 Les Laboratoires BROTHIER
41, rue de Neuilly - 92735 Nanterre Cedex, France

www.brothier.com

www.coalgan-gamme.com

SITE DE PRODUCTION

ZA des Roches - 49590 Fontevraud l'Abbaye - France

0 800 355 153

**Service & appel
gratuits**

info@brothier.com